

Instruções de utilização Lentes de contacto ACUVUE® de uso diário (substituição frequente) e uso prolongado



LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA. AS LENTES DE CONTACTO ACUVUE® SÃO DISPOSITIVOS MÉDICOS E DEVEM SER SEMPRE ACONSELHADAS POR UM ESPECIALISTA DA VISÃO. SIGA SEMPRE AS INDICAÇÕES DO SEU ESPECIALISTA DA VISÃO E AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS NESTE FOLHETO.

Table with 4 columns: Marca, Material, Solução de embalagem, Plano de utilização. It lists various ACUVUE lens models like ADVANCE, OASYS, VITA, and MULTIFOCAL with their respective materials and usage instructions.

Legenda: Solução de embalagem: ① Solução salina de borato tamponada. ② Solução salina de borato tamponada com éter metílico de celulose. Material: ③ O material das lentes contém silicão e satisfaz os padrões de absorção UV de Classe 1 com transmissibilidade inferior a 1% de radiação UVB (280-315 nm) e 10% de radiação UVA (315-380 nm).

Os boratos (ácido bórico e borato de sódio) são definidos como substâncias CMR da categoria 1B numa concentração superior a 0,1% em peso e são seguros quando o produto é utilizado de acordo com as instruções na rotulagem.

*Fotocromático é definido como apresentando uma alteração reversível na cor ou tom quando exposto a tipos específicos de luz de intensidade suficiente. Na ausência de luz ativante, a cor volta à cor normal.

Nem todos os produtos listados poderão estar disponíveis no seu país. Verifique que produto está disponível no seu país em www.acuvue.com.

1. DESCRICÃO DO PRODUTO E USO PREVISTO Este folheto diz respeito às seguintes lentes de contacto ACUVUE® que se destinam a uso diário (Substituição frequente) (menos de 24 horas, enquanto está acordado) ou uso prolongado (mais de 24 horas, incluindo enquanto dorme) que podem ser utilizadas continuamente até 7 dias/6 noites e devem ser descartadas aquando da sua remoção. Se forem utilizadas desta forma, não é necessária qualquer limpeza ou desinfecção. O seu especialista da visão irá determinar o seu plano de utilização e o plano de substituição.

- As lentes de contacto esféricas ACUVUE® destinam-se a um uso diário e a correção ótica de miopia (má visão à distância) e hipermetropia (má visão ao perto) em pessoas com olhos saudáveis que possam ter até 1.00D (dióptria) ou menos de astigmatismo.
• As ACUVUE® OASYS Transitions são lentes de contacto fotocromáticas indicadas para a atenuação da luz brilhante, dando que contém um aditivo fotocromático que absorve dinamicamente a luz visível.

Recomenda-se que primeiramente seja iniciado um plano de uso diário. Se for bem-sucedido, a introdução gradual do uso prolongado das lentes pode ser seguido tal como determinado pelo seu especialista da visão.

Uma vez retiradas, é recomendado que as lentes permaneçam fora do olho durante o período de descanso, de um dia para o outro, ou superior.

As suas lentes de contacto podem ser prescritas para determinadas condições e doenças oculares como lentes de tratamento para a córnea a fim de aliviar o desconforto e atuar como um curativo protetor. O seu especialista da visão dir-lhe-á se tiver uma condição deste género e poderá prescrever medicamentos adicionais ou esquemas de substituição para a sua condição específica. Nunca deverá fazer automedicação com uma lente de contacto ou medicamentos oculares sem primeiro ser visto pelo seu especialista da visão.

- Para proteção da córnea em anomalias na córnea, tais como entropião, triquiase, cicatrizes no tarso (pálpebras inferiores) e erosão recorrente da córnea. Adicionalmente, estão também indicadas para proteção sempre que suturas ou malformação da estrutura ocular, degeneração ou paralisia possam resultar na necessidade de proteger a córnea da exposição ou irritação repetida.
• Para alívio da dor na córnea em condições como queratopatia bolhosa, erosão e abrasão epitelial, queratite filamentar e pós-queratoplastia.

Todas as lentes de contacto ACUVUE® têm um filtro de radiação UV que ajuda na proteção contra a transmissão prejudicial da radiação UV para a córnea e olho.

ADVERTÊNCIA: AS LENTES DE CONTACTO COM ABSORÇÃO UV NÃO SUBSTITUEM OUTROS ACESSÓRIOS OCULARES COM ABSORÇÃO UV DE PROTEÇÃO, TAIS COMO ÓCULOS COM ABSORÇÃO UV OU ÓCULOS DE SOL, PORQUE AS LENTES DE CONTACTO NÃO COBREM TOTALMENTE O OLHO E A ÁREA CIRCUNDANTE. DEVERÁ CONTINUAR A UTILIZAR ÓCULOS COM ABSORÇÃO UV CONFORME RECOMENDADO.

NOTA: A exposição prolongada à radiação UV é um dos fatores de risco associado às cataratas. A exposição é baseada num conjunto de fatores, tais como condições ambientais (altitude, geografia, nebulosidade) e fatores pessoais (natureza e extensão das atividades ao ar livre). As lentes de contacto com filtro UV ajudam na proteção contra os raios UV prejudiciais. No entanto, ainda não foram realizados estudos clínicos para demonstrar que o uso de lentes de contacto com proteção UV reduz o risco de desenvolvimento de cataratas ou qualquer outra anomalia visual. Consulte o seu especialista da visão para mais informações.

- 2. CONTRAINDICAÇÕES (em que situações não deve utilizar) Quando usar lentes de contacto para AMETROPIA REFRAATIVA, NÃO UTILIZE estas lentes se alguma das situações se aplicar a si:
• Inflamação ou infeção no olho ou pálpebras ou em redor dos mesmos
• Qualquer doença ocular, lesão ou anomalia que afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras

desenvolver uma reação alérgica. O seu especialista da visão poderá prescrever lentes de contacto para uso terapêutico a fim de auxiliar o processo de cicatrização de certas condições oculares, que podem incluir as referidas acima.

- 3. ADVERTÊNCIAS – o que deve saber sobre a utilização das lentes de contacto: PROBLEMAS NOS OLHOS, INCLUINDO AS ÚLCERAS DA CÓRNEA (queratite ulceroasa), PODEM DESENVOLVER-SE RAPIDAMENTE CONDUZINDO À PERDA DE VISÃO. SE TIVER ALGUM DOS SEGUINTES SINTOMAS:
• Desconforto ocular • Perda de visão • Alterações na visão
• Lacrimejar excessivo • Vermelhido dos olhos

DEVE REMOVER IMEDIATAMENTE AS LENTES E CONTACTAR DE IMEDIATO O SEU ESPECIALISTA DA VISÃO.

- As lentes prescritas para uso diário (ou seja, o seu especialista da visão dá-lhe instruções para retirar as lentes no fim de cada dia) não devem ser utilizadas enquanto estiver a dormir. Estudos clínicos têm demonstrado que o risco grave de desenvolver problemas oculares (ou seja, queratite ulceroasa) é superior quando as lentes são usadas de um dia para o outro.
• Estudos têm demonstrado que as pessoas que usam lentes de contacto e são fumadoras têm uma taxa superior de problemas oculares (ou seja, queratite ulceroasa) em comparação com não fumadores.

- 4. PRECAUÇÕES • NÃO use a embalagem individual estéril se esta estiver aberta, danificada ou após a data de validade indicada.
• Quando tiver as primeiras lentes, certifique-se de que é capaz de colocar e retirar as suas lentes (ou que se faz acompanhar de alguém capaz de o fazer por si) antes de deixar o consultório do seu especialista da visão.
• NUNCA use pinças ou outras ferramentas para retirar as suas lentes do respetivo recipiente.

Devido ao número reduzido de pacientes inscritos em investigações clínicas de lentes, todos os poderes refrativos, configurações de design ou parâmetros de lentes disponíveis no material da lente não são avaliados em números significativos. Por conseguinte, ao selecionar um design e parâmetros da lente apropriados, o especialista da visão deve ter em consideração todas as características da lente que podem afetar o seu desempenho e a saúde ocular, incluindo a permeabilidade ao oxigênio, humidade, espessura central e periférica e diâmetro da zona ótica.

- O potencial impacto destes fatores na saúde ocular do paciente deve ser cuidadosamente ponderado contra a necessidade de correção refrativa do paciente; por conseguinte, a saúde ocular do paciente e o desempenho da lente não devem ser cuidadosa e constantemente monitorizados pelo especialista da lente que prescreveu a lente.
• Se usar as suas lentes de contacto para corrigir presbiopia poderá não obter a melhor acuidade visual corrigida para visão ao longo ou ao perto. As necessidades visuais são diferentes para as várias pessoas, pelo que o seu especialista da visão deve trabalhar consigo para selecionar o tipo de lente mais apropriado para a sua situação.
• Os especialistas da visão devem instruir o paciente a retirar imediatamente as lentes se os olhos ficarem vermelhos ou irritados.
• Contacte sempre o seu especialista da visão antes de utilizar qualquer medicamento nos olhos.

5. REAÇÕES ADVERSAS (Efeitos secundários) – Possíveis problemas e o que deve fazer

Tenha em conta que podem surgir problemas enquanto estiver a usar lentes de contacto e estes podem ser associados a um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas:

- Ardor, prurido, comichão e/ou olhos secos
• Conforto reduzido da lente ou sensação de corpo estranho nos olhos
• Inchaço ou inflamação nos olhos ou em redor destes
• Vermelhido
• Problemas nas pálpebras
• Lacrimejo e/ou secreções oculares pouco usuais

No caso de apresentar algum dos sintomas anteriores, poderá estar presente uma condição grave dos olhos. DEVE RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e ser visto pelo seu especialista da visão de forma que o problema possa ser identificado e tratado, se necessário, para evitar danos oculares graves.

Reconhecer problemas e o que fazer

Deve realizar um autoexame simples de 3 partes pelo menos uma vez por dia. Pergunte a si próprio:
• Como me sinto com as lentes colocadas nos meus olhos?
• Qual é o aspeto dos meus olhos?
• Notei alguma alteração na minha visão?
Se detetar algum problema, deve REMOVER IMEDIATAMENTE AS SUAS LENTES. Se o problema ou desconforto parar, descarte as lentes e coloque lentes novas no olho. Se depois de colocar as novas lentes, o problema persistir, REMOVA IMEDIATAMENTE AS LENTES E CONSULTE O SEU ESPECIALISTA DA VISÃO.

Durante o uso terapêutico das lentes de contacto ACUVUE® OASYS com HYDRACLEAR® PLUS, um efeito adverso poderá dever-se a doença existente, ou lesões podem ser devidas à utilização de lentes de contacto. Pode acontecer que a doença ou a condição pre-existente possa piorar se for utilizada uma lente de contacto mole para uso terapêutico para tratar um olho que já apresenta uma doença ou lesão ocular. Para evitar danos oculares graves, deve consultar DE IMEDIATO o seu especialista da visão, se os sintomas aumentarem enquanto utiliza as lentes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Quando tiver as primeiras lentes, certifique-se de que é capaz de colocar e retirar as suas lentes (ou que se faz acompanhar de alguém capaz de o fazer por si) antes de deixar o consultório do seu especialista da visão.

NÃO use a embalagem individual estéril se esta estiver aberta, danificada ou após a data de validade indicada.

Passo 1: Introdução

É essencial que aprenda e faça uma boa higiene ao cuidar e manusear as novas lentes. A limpeza é o primeiro e o mais importante aspeto para um bom uso das lentes de contacto. Mais especificamente, as suas mãos devem estar limpas, secas e sem vestígios de sabão, loção ou creme antes de manusear as lentes.

Antes de começar:

- Lave sempre as mãos devidamente com água quente e um sabão neutro, enxague-as cuidadosamente e seque-as com uma toalha que não liberte pelos, antes de tocar nas suas lentes, a fim de reduzir a probabilidade de surgir uma infeção.

